



Aislar®

66053505/11



**KULZER**

MITSUI CHEMICALS GROUP

Importado e Distribuído por  
Kulzer South América Ltda.  
CNPJ 48.708.010/0001-02  
Rua Cenno Sbrighi, 27 – cj. 42  
São Paulo – SP – CEP 05036-010  
sac@kulzer-dental.com

Resp. Técnica: Dra. Regiane Marton – CRO 70.705  
N° ANVISA: vide embalagem



Manufacturer:  
Kulzer GmbH  
Leipziger Straße 2  
63450 Hanau (Germany)

## FR Mode d'emploi Aislar®

### Composition

Isolant à base d'alginate, exempt de formaldéhyde

### Indications

Destiné à l'isolation des modèles en plâtre lors de l'utilisation des résines. Le film isolant garantit des surfaces planes sur la résine. La séparation résine/plâtre ainsi que plâtre/plâtre est optimale.

### Contre-indications

Ne pas utiliser en bouche.

### Remarques

Éviter toute contamination du liquide isolant par exemple par des résidus de plâtre, un pinceau serti de métal, etc.

### Mise en œuvre

La cire doit être soigneusement éliminée par ébullantage. Verser la quantité requise dans une coupelle et appliquer au pinceau. Après ébullantage, enduire le plâtre chaud ou froid deux fois d'une fine couche de solution isolante. Il ne doit subsister aucun résidu d'isolant dans les striures et les sillons. Ne pas mouiller les dents en résine ni les crochets. Après séchage complet du film isolant, la résine peut être immédiatement déposée. Tout excédent d'Aislar ne doit en aucun cas être remis dans la bouteille d'origine. Tous les modèles desséchés doivent être trempés dans de l'eau avant d'être isolés. Le temps de trempage dépend du degré de dessèchement des modèles et est d'environ 5 à 15 mn. Le trempage évite que des bulles d'air provenant du plâtre pénètrent dans la résine souple pendant la polymérisation sous pression.

### Conseil pour le stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 25°C (77°F). Ne pas utiliser après la date de péremption. Éviter l'exposition directe au soleil. Refermer hermétiquement après avoir prélevé du produit. Garder hors de portée des enfants. Vérifier visuellement l'absence de dommage avant toute utilisation. Les produits endommagés ne doivent pas être utilisés.

### Informations relatives à l'élimination

Veillez respecter les directives nationales et la fiche de données de sécurité du matériau (disponible sur le site [www.kulzer-dental.com](http://www.kulzer-dental.com) ou auprès des représentants Kulzer locaux).

® = marque déposée de Kulzer GmbH

Mise à jour de l'information : 2015-06